

Instrucciones de uso

Obtención de la muestra autocoleccionada

Instrucciones de autocolección de Copan FLOQSwabs® (552C.RM)

El FLOQSwabs® 552C.RM se debe utilizar para la colección de muestras vaginales para su uso con las pruebas cobas® 4800 para el VPH o cobas® para el VPH. Los usuarios deben leer y seguir atentamente las instrucciones. Si tiene alguna pregunta o dificultad con el proceso de colección que se describe a continuación, solicite más información a su proveedor de atención médica.

Si se producen eventos inesperados no descritos en estas instrucciones durante la autocolección de muestras, informe a su proveedor de atención médica.

Abra el hisopo justo antes de utilizarlo y tenga cuidado de no tocar ninguna superficie con la punta del hisopo.

ADVERTENCIAS:

Informe a su proveedor de atención médica si ha utilizado alguna sustancia, como cremas vaginales, geles, lubricantes, etc., en las 24 horas previas a la colección.

No utilizar en los siguientes casos:

- durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto;
- si recientemente se sometió a una cirugía ginecológica;
- en caso de sangrado inusual o dolor pélvico.

No se ha evaluado la colección de muestras durante el ciclo menstrual.

Durante los 3 días previos a la autocolección de una muestra vaginal, se debe evitar el uso de óvulos, cremas o lavados vaginales, anticonceptivos vaginales o preservativos.


Durante los 2 días anteriores a la autocolección de una muestra vaginal, se debe abstener de mantener relaciones sexuales y de realizarse ecografías o exámenes ginecológicos.



Lávese las manos con agua y jabón antes de empezar.




Gire y retire la tapa para sacar el hisopo del tubo.

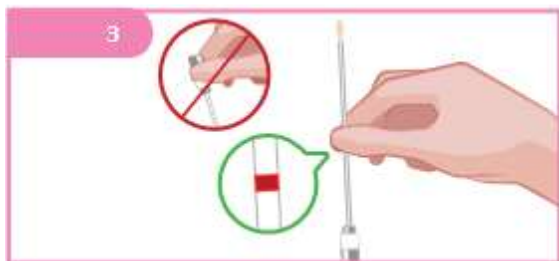

Sujete el hisopo en la marca roja.



Póngase en una posición cómoda y, con la mano libre, extienda la piel de la apertura vaginal mientras introduce con cuidado el hisopo hasta la marca roja.

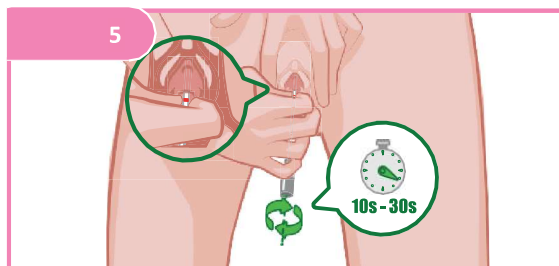

Gire suavemente el hisopo durante de 10 a 30 segundos.
s = SEGUNDOS



Vuelva a introducir el hisopo en el tubo hasta que escuche un CLIC. Después de la colección, entregue el hisopo para que se analice.

Suspensión de la muestra autocoleccionada


Instrucciones de suspensión de muestra de Copan FLOQSwabs® #552C.RM

Instrucciones para la manipulación de muestras autocoleccionadas con Copan FLOQSwabs® #552C.RM para el análisis de las pruebas cobas® 4800 para el VPH o cobas® para el VPH.


La muestra autocoleccionada se debe colocar en el medio una vez que se haya obtenido.

- Lea todas las instrucciones antes de comenzar la suspensión de la muestra.
- Para la colección de muestras, siga las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo de obtención.
- Una vez que se haya coleccionado la muestra, continúe con las siguientes instrucciones para conservarla:


Manipule la muestra coleccionada cuidadosamente.

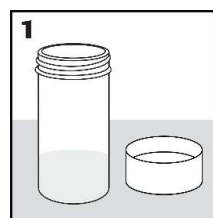


1. Con cuidado, quite la tapa del vial que contiene el medio y colóquelo sobre una superficie estable y plana.

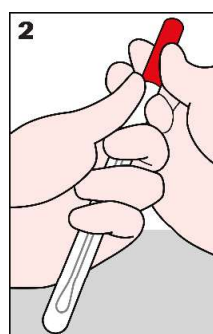

2. Quite lentamente la tapa del FLOQSwab para retirar el hisopo del tubo. **Minimice el contacto con las paredes internas del tubo cuando retire el FLOQSwab.**

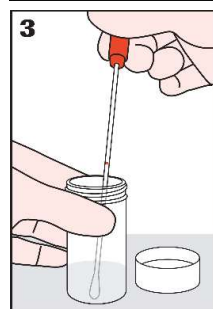


3. Sujete el vial con una mano y, con la otra, introduzca la punta del FLOQSwab en el vial hasta que la punta del FLOQSwab esté completamente sumergida en el medio y toque el fondo del vial.

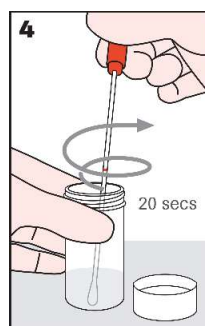

4. Sin soltar el vial, gire el FLOQSwab por la pared interior del vial durante 20 segundos mientras **se asegura de que el hisopo permanece sumergido** en el medio. Tenga cuidado de no salpicar.



5. Retire con cuidado el FLOQSwab del vial pasándolo por la pared interior hasta que la punta deje de estar sumergida en el medio. **Presione la punta contra la pared interior del vial para drenar el líquido** del hisopo. Coloque el FLOQSwab en el tubo y deséchelo.

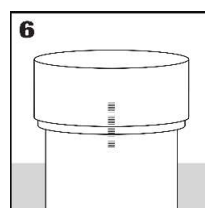

6. Vuelva a tapar el vial y apriételo hasta que **las líneas de la tapa y el vial se junten o se superpongan ligeramente** para evitar fugas. Almacenar en posición erguida.

7. Ahora, la muestra se puede procesar con la prueba cobas® 4800 para el VPH o la prueba cobas® HPV.


Glosario



FLOQSwab/Hisopo: el dispositivo de autocolecta que se utiliza para obtener la muestra.



Tubo: un recipiente protector en el que vendrá el dispositivo de autocolecta y que se puede utilizar para guardar temporalmente el dispositivo de obtención una vez que se haya coleccionado la muestra.

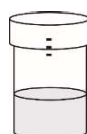

Vial: un recipiente que contiene 20 ml de solución transparente. La muestra que colecciona se deberá transferir a este recipiente, que se enviará al laboratorio para su procesamiento.

Medio: nombre que recibe el líquido que viene en el vial.