

Instrucciones para la recolección de muestras de oxiuros

Pinworm Collection Kit



El mejor momento para recolectar la muestra es inmediatamente al levantarse por la mañana. La muestra debe recolectarse antes de iniciar el tratamiento. No debe ducharse ni bañarse, defecar, limpiarse el área rectal, ni aplicarse ungüento en la piel de esa área hasta después de recolectar la muestra.

1. Identifique el recipiente para la recolección de oxiuros con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente.
2. Sostenga la espátula por la tapa y sáquela del recipiente. La espátula tiene un “lado adhesivo” para recolectar los huevos de oxiuros. Los huevos se pegarán al adhesivo.
3. Separe los glúteos y, aplicando presión moderada, presione el lado adhesivo de la espátula para la recolección de oxiuros (marcada ADH) contra la piel alrededor del recto entre 3 y 4 veces.
4. Inserte la espátula en el recipiente para la recolección de oxiuros y cierre bien la tapa.
5. Lávese minuciosamente las manos después de recolectar la muestra.
6. Identifique la muestra con la fecha y la hora de recolección.

7. Devuelva la muestra al laboratorio lo antes posible. La muestra debe mantenerse a temperatura ambiente.